

# PIRATOPLAST®

MIX, MIX Extra Soft, Boy Soft, Girl Soft

## Augenpflaster zur Okklusionstherapie

**Piratoplast Augenpflaster** sind für die Okklusionstherapie bei Kindern (ab 6 Monate) und Erwachsenen gedacht und können von medizinischem Fachpersonal und Laien im häuslichen Umfeld verwendet werden. Die Augenpflaster sind selbsthaftend und mit einem lichtundurchlässigen Softpad ausgestattet.

### Indikationen

- Amblyopie
- Strabismus
- Diplopie

### Anwendungshinweis

1. Bitte achten Sie darauf, dass die Haut sauber, trocken und frei von Creme oder Salbe ist.
2. Ziehen Sie die weiße Papierfolie vom Pflaster ab.
3. Setzen Sie das Pflaster so auf das geschlossene Auge, dass die weiße Innenauflage auf der Augenhöhle liegt.
4. Drücken Sie die Pflasterränder nun gut an.

### Warnhinweise

Bei der Okklusionstherapie kommt es zu einer signifikanten Einschränkung des Sichtbereiches. Bei der Okklusionstherapie besteht das Risiko einer Okklusionsamblyopie des Führungsauges. Bei Verschlechterung der Sehschärfe des abgedeckten Auges im Laufe der Therapie bitte den Arzt konsultieren.

### Die Behandlung erfolgt wie vom Arzt oder der Orthoptistin verordnet.

Piratoplast Augenpflaster sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt, bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung kann die Beschaffenheit und Leistung beeinträchtigt und der Therapieerfolg gefährdet werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

Das Augenpflaster kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.



Rev.: 21040799300-ASIFU